

Použití kyret.

typ 1 /bílě označená/

všechny kořenové plochy frontálních zubů horní a dolní čelisti

typ 2 /žlutě označená/

všechny kořenové plochy frontálních zubů horní a dolní čelisti

typ 3 /červeně označená/

univerzální použití pro všechny kořenové plochy frontálních zubů a premolárů horní a dolní čelisti

typ 4 /modře označená/

tvářové a jazykové kořenové plochy premolárů a molárů horní a dolní čelisti

typ 5 /zeleně označená/

tvářové a jazykové plochy premolárů a molárů horní a dolní čelisti—typ scaler—2 řezné hrany

typ 6 /černě označená/

mésialní kořenové plochy premolárů a molárů horní a dolní čelisti

typ 7 /fialově označená/

distální kořenové plochy premolárů a molárů horní a dolní čelisti



## Návod na ostření kyret.

Ostrými nástroji se doba ošetření pacienta zkracuje až o 30%, proto by kyrety měly být po každém použití naostřeny. K naostření kyret jsou nejvhodnější ploché pravouhlé obtahovací kamínky/lze objednat u MEDIN a.s., typ K152, rozměr 25x5x100/.

### Metodika broušení.

Obtahovací kamínek navlhčíme vodou nebo sterilním roztokem NaCl a tento roztok prstem rozetřeme po celé ploše kamínku. Uchopíme kyretu a ruku si pohodlně opřeme o pevnou podložku/např.stůl/.Kyretu držíme vždy tak,aby výbrus funkční koncovky ležel vodorovně, viz obrázek. Špička nástroje ukazuje k tělu, při broušení protilehlé koncovky od těla.

Brousek přiložíme ve velkém úhlu/asi 30°/ke kyretě, pomalu táhneme dolů a současně zmenšujeme úhel mezi brouskem a ostřím/viz obr./.

Zmenšujeme tento odstup při každém obtahovacím pohybu, až se usadí na ostří kyrety vodní film. Nyní si můžeme být jisti, že je řezná hrana optimálně nabroušená.

### Kontrola ostří.


Nástroj podržíme blízko zdroje světla a odčísme ním tak, aby řezná hrana mířila na zdroj světla. Odráží-li se světlo na řezné hraně je nástroj tupý /ostrá hrana nemůže odrážet světlo/.

Ostrost kyrety můžeme také zkontrolovat na kousku plexiskla. Ostrý nástroj se při této zkoušce do plexiskla zasekne. Obvyklá zkouška ostří na nehtu je pro tyto nástroje nevhodná.

### Jak zacházet s obtahovacím kamínkem.

Při broušení využíváme celou plochu brousku, aby se zamezilo tvoření rýh. Po každém použití kamínek pečlivě očistíme vodou a běžnými čistícími prostředky. Při větším znečištění kamínek očistíme buď jiným obtahovacím brouskem, nebo smirkovým papírem. Tvrdé fleky můžeme odstranit troškou brusného prášku. Obtahovací kamínky můžeme autoklávkovat, po sterilizaci je trochu naolejujeme.



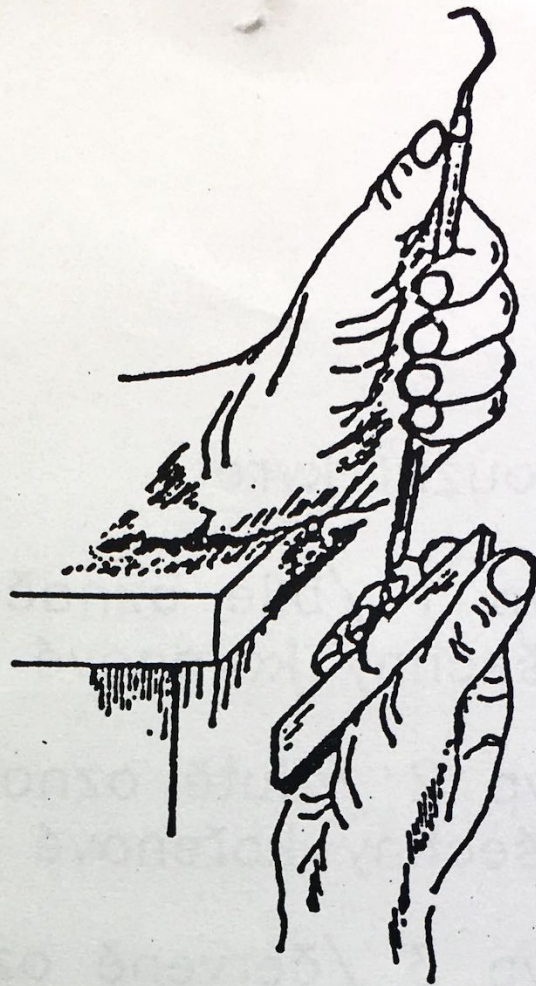

**výbrus  
funkční koncovky  
/při broušení  
ve vodorovné poloze/**

