



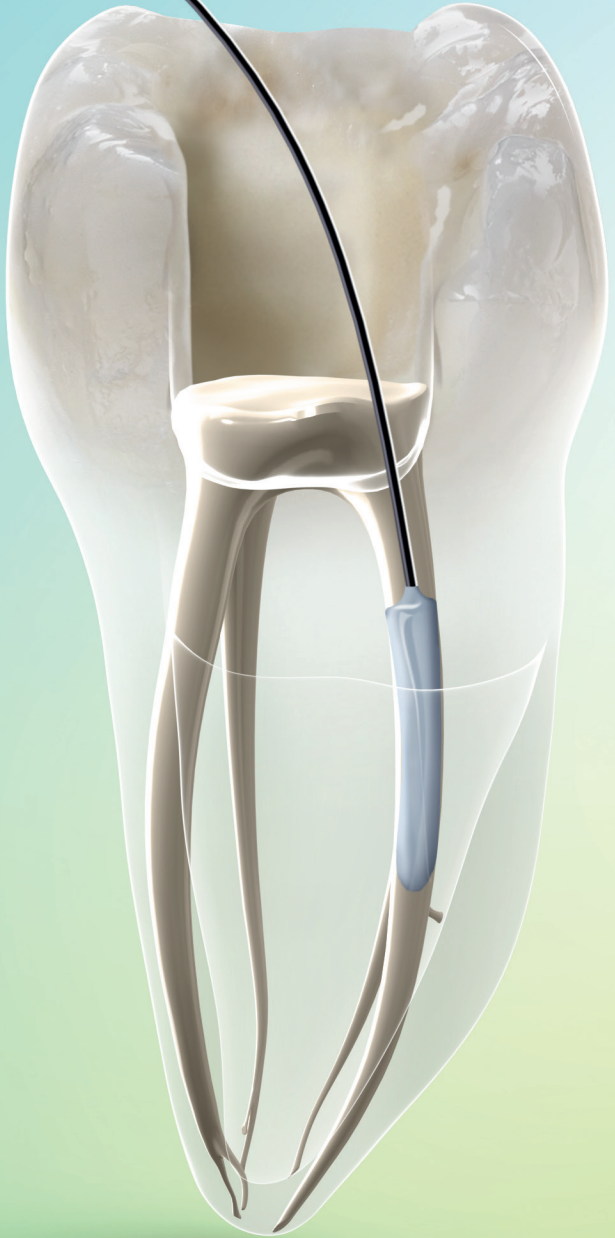

AH Plus® biokeramický sealer

Připravit, pozor, teď!


#EndoPassion

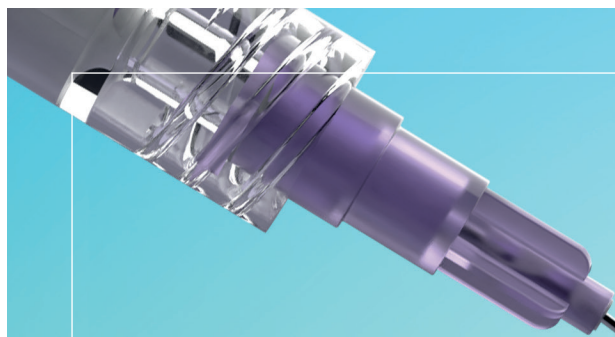


AH Plus® biokeramický sealer

V čem tento sealer vyniká?

Bioaktivita biokeramických sealerů je důležitá, ale pro zajištění stabilního utěsnění potřebujete víc. Utěsnění apikální oblasti je kompletní až poté, co sealer ztuhne. AH Plus® biokeramický sealer se odlišuje od jiných sealerů tím, že rychle tuhne, je velmi odolný vůči vymytí a vykazuje vyšší radioopacitu oproti jiným přípravkům na trhu.

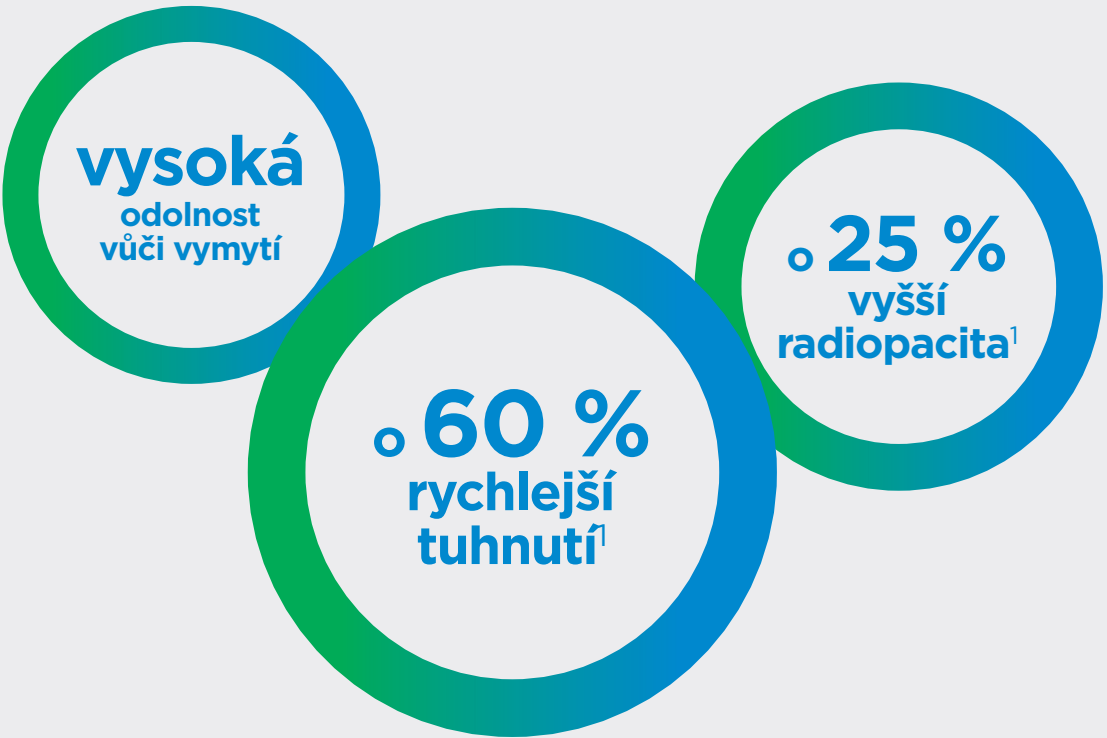

1. nepublikovaná data, porovnání s EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer

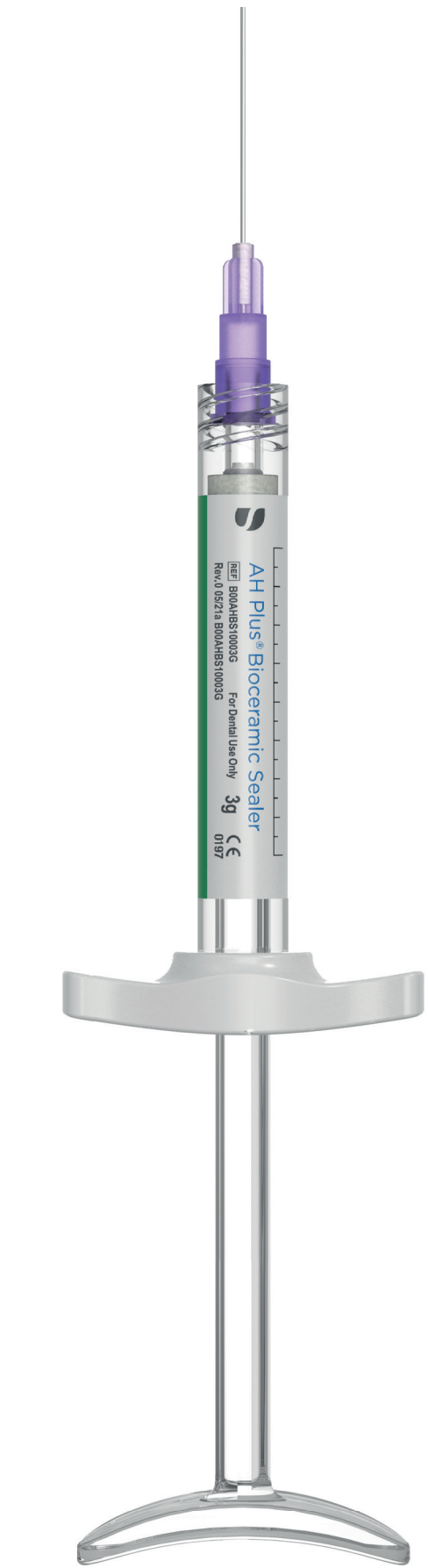

- 1

Rychlejší tuhnutí

4 hodiny
Náš biokeramický sealer

10 hodin
EndoSequence® BC Sealer™
- 2

Rozměrově stabilní

Nízká rozpustnost 0,11 % a vysoká odolnost vůči vymytí pro stabilní a dlouhodobé utěsnění kořenového kanálku.

Rozpustnost¹

Sealer	Rozpustnost (%)
AH Plus® biokeramický sealer	0,11 %
EndoSequence® BC Sealer™	3 % až 23 %

1. nepublikovaná data. Stejně výsledky rozpustnosti pro EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.
- 3

Bezpečný a biokompatibilní

Podporuje hojení tkáně a nestimuluje periodontální tkáň, i když je s ní v kontaktu.²
- 4

Vyšší radioopacita

O 25 % vyšší radioopacita než u EndoSequence® BC Sealer™ a TotalFill® BC Sealer™.²

AH Plus® biokeramický sealer

EndoSequence® BC Sealer™

2. nepublikovaná data.
- 5

Lepší estetické výsledky


Náš sealer neobsahuje oxid bismutový, a tudíž nezbarvuje zub a zaručuje sebevědomý úsměv.³

3. složení produktu
- 6

Odstranitelnost

Odstranitelný i po ztuhnutí běžným ručním nástrojem nebo NiTi kořenovým nástrojem.

AH Plus® biokeramický sealer

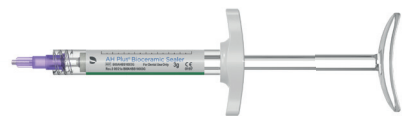

Starter Kit	B KT AHBS 000 000	Syringe Refill	B 00 AHBS 100 03G	Cannula Refill	B 00 AHBS 020 24G
-------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Gutaperčové čepy
ProTaper Ultimate Conform Fit®

Balení 60 gutaperčových čepů	
F1	B NS PULG FGP OF1
F2	B NS PULG FGP OF2
F3	B NS PULG FGP OF3
FX	B NS PULG FGP OFX
FXL	B NS PULG FGP FXL
ASSORTMENT	
F1-F3	B NS PULG FGP AST
12x-F1, 24x-F2, 24x-F3	

Gutaperčové čepy
WaveOne® Gold Conform Fit®

Balení 60 gutaperčových čepů	
Small	B 00 WGGP F00 SML
Primary	B 00 WGGP F00 PRI
Medium	B 00 WGGP F00 MED
Large	B 00 WGGP F00 LRG
ASSORTMENT	
B 00 WGGP F00 AST	

Gutaperčové čepy
TruNatomy® Conform Fit®

Balení 60 gutaperčových čepů	
Small	B 00 TNGP F00 SML
Prime	B 00 TNGP F00 PRM
Medium	B 00 TNGP F00 MED
ASSORTMENT	
B 00 TNGP F00 AST	

Gutta-Percha		Dentsply Tulsa Dental Specialties 608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37604	2797
AH Plus® Bioceramic Sealer		Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz	0197




INL / B EN AH00 BRC 000 / 00 / 2021 –created 07/2021

Třikrát uzamkněte
vaši výplň

Jen řešení od Dentsply Sirona
vám může zajistit unikátní Triple Lock™:

(1) Vypreparujete ideální tvar kořenového kanálku. (2) Dosáhnete bezkonkurenčního dosazení gutaperčových čepů Conform Fit®, které odpovídají těmto unikátním tvarům.¹ (3) Nakonec pomocí AH Plus® biokeramického sealeru¹ získáte chemickou vazbu s gutaperčovou i stěnami kanálku bez výskytu vzduchových bublin.

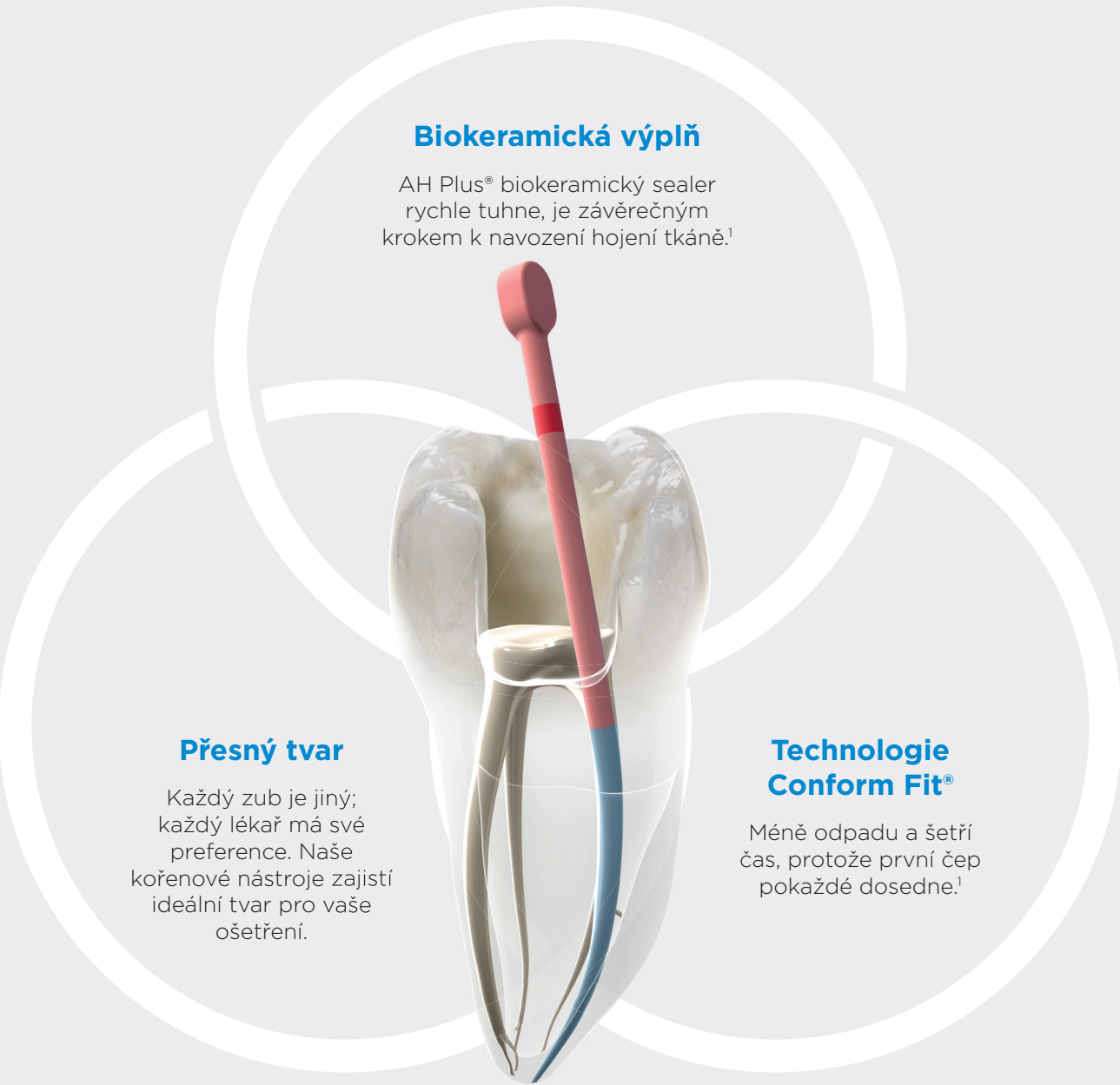

Objevte, jaké DS řešení vám sedí nejlépe.

ProTaper Ultimate™ | WaveOne® Gold | TruNatomy®

1. nepublikovaná data.

Nastavte si nový standard

AH Plus® biokeramický sealer

1

Biokompatibilní
Zajišťuje ideální prostředí pro tvorbu hydroxyapatitu, čímž usnadňuje tělu vlastní proces hojení.¹

2

Bez vzduchových bublin
Náš sealer produkuje širokou škálu hydroxyapatitových krystalů uvnitř dentinových tubulů. Je lipofilní a hydrofilní, což vede k vytvoření chemické vazby se stěnou kanálku a zároveň s gutaperčou, aniž by docházelo k tvorbě vzduchových bublin. Nejsou zapotřebí gutaperčové čepy s upraveným povrchem.¹

3

Odolný vůči vymytí
Díky nízké rozpustnosti a malé tloušťce filmu náš sealer stabilně utěsní kořenový kanálek.

Tloušťka filmu ²		Rozpustnost ³	
AH Plus® biokeramický sealer	25	AH Plus® biokeramický sealer	0,11 %
EndoSequence® BC Sealer™	75	EndoSequence® BC Sealer™	3 % až 23 %

2. nepublikovaná data. Tatáž tloušťka filmu platí pro EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.
3. nepublikovaná data. Tatáž tloušťka filmu platí pro EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.

4

Pohodlí
Dodáván v praktické předmíchané formě ve stříkačce s malou kanylou velikosti 24, kterou je možné zavést přímo do kořenového kanálku.¹

Technologie Conform Fit®

100% usazení⁴

Rozsah usazení s gutaperčovými čepy Conform Fit®

vs

21% usazení⁵
Při použití levných gutaperčových čepů

Rozsah usazení s levnými gutaperčovými čepy

1. nepublikovaná data 4. ve 28 vzorových kanálkách 5. 28 náhodných čepů.