

Silný tým pro citlivé plochy

FD 366 sensitive Rychlá dezinfekce

Pomocí FD 366 sensitive můžete mezi jednotlivými ošetřeními dezinfikovat citlivé povrchy z plastu, akrylového skla nebo umělé kůže rychle, účinně a zvláště šetrně. Tím zachováte hodnotu ošetřovacích jednotek, přístrojů, nástrojů a mnoha dalších předmětů zařízení.

1. Po každém ošetření dezinfikujte kontaminované povrchy a předměty v blízkosti pacienta.
2. Na utěrku naneste nezředěný přípravek FD 366 sensitive a rozeřte ho.
3. Zvlhčete celý povrch dezinfikovaných ploch a předmětů.
4. Vyčištěné plochy dezinfikujte ještě jednou.
5. Přípravek nechte působit.
6. Povrchy a předměty nechte oschnout.



FD 360 Čištění umělé kůže

Pomocí FD 360 pravidelně čistěte šetrným způsobem ošetřovací křesla z umělé kůže a udržujte je. Čistič zajišťuje čistotu hluboko pronikající do pórů a – s několika mililitry týdně – stále hedvábně lesklý povrch. Pomocí FD 360 zachováte dlouhodobě hodnotu svých namáhaných ošetřovacích křesel.

1. FD 360 použijte v případě potřeby.
2. Čisticí tekutinu nastříkejte nezředěnou na čištěnou plochu nebo speciální houbičku.
3. FD 360 rozeřte utěrkou nebo při intenzivním čištění speciální houbičkou. To vede k ještě důkladnějšímu čištění pronikajícímu hluboko do pórů.
4. Následně setřete nadbytečný přípravek FD 360 suchou utěrkou.