

# Inovatívna technológia pre dlhotrvajúce cementovanie

## Tolerantný ku vlhkosti



Pri aplikácii GC FujiCEM 2 nie je potrebné používať koferdam alebo inú ochrany pred vlhkosťou.

## Samo-adhezívny



V prípravných krokoch nie je potrebné predchádzajúce leptanie ani bondovanie.

## Ideálna konzistencia



Namiešaná pasta netečie, avšak vyniká veľmi dobrou zatekavosťou pod tlakom pri nasadzovaní.

## Bezkonkurenčná hrúbka filmu



Namiešaná pasta vyniká veľmi dobrou zatekavosťou pod tlakom pri nasadzovaní a vytvára extrémne tenký fixačný film.

## Jednoduché očistenie



Minútu po aplikácii cement dosiahne gumovú konzistenciu a vtedy je možné prebytočný materiál bezproblémovo odstrániť.

## Trvácnosť cementácie



Žiadna pooperačná senzitivita, zabezpečená trvácnosť adhézie a trvalá prítomnosť fluoridov.

Dr. F. Raux, Francúzsko

## FUJICEM 2



FORCE & FUSION TECHNOLOGY

## TECHNOLÓGIA FORCE & FUSION

Za podpory inovatívnej technológie Force & Fusion, GC FujiCEM 2 zabezpečuje vylepšenú pevnosť vo väzbe, ako pôvodný FujiCEM, čím dosiahnete ešte dlhšiu trvácnosť fixácie cementovaných náhrad\*.

\*Súbory na vyžiadanie

## FORCE

Nová vysoko elastická „cross linking“ monomérová technológia

Flexibilný monomér s dlhým reťazcom dáva materiálu GC FujiCEM 2 vyššiu pevnosť v ohybe, tým materiál pôsobí ako tlmič nárazov a disponuje lepšou odolnosťou voči okluzálnej záťaži.



## FUSION

Modifikovaná úprava povrchu plniva

Technológia zabezpečuje vytvorenie silnej väzby medzi sklenenými častočkami a živinicovou maticou.

# GC FujiCEM 2, spoľahlivý, ľahko použiteľný a univerzálny

## Balenia

GC FujiCEM 2		
900899	GC FujiCEM 2 SL Automix EEP	Paste Pak kartuša SL (13,3 g / 7,2 ml) (2), GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL (44)
900896	GC FujiCEM 2 SL náhradné balenie EEP	Paste Pak kartuša SL (13,3 g / 7,2 ml) (2) s miešacou podložkou (No. 22)
900901	GC FujiCEM 2 SL Automix Starter kit s dávkovačom Paste Pak (kovový)	Paste Pak kartuša SL (13,3 g / 7,2 ml) (1), GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL (15), GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo (5), dávkovač Paste Pak (kovový) (1)
900900	GC FujiCEM 2 SL Automix Starter kit s dávkovačom GC FujiCEM 2 (plastový)	Paste Pak kartuša SL (13,3 g / 7,2 ml) (1), GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL (15), GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo (5), dávkovač GC FujiCEM 2 (plastový) (1)
GC FujiCEM 2 príslušenstvo		
900902	GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL, náhradné balenie	GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL (20)
900903	GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo, náhradné balenie	GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo (10)
001573	Dávkovač Paste Pak	Dávkovač Paste Pak (kovový) (1)
004647	Dávkovač GC FujiCEM 2	Dávkovač GC FujiCEM 2 (plastový) (1)



GC FujiCEM 2 SL Automix



GC FujiCEM 2 SL Refill



GC FujiCEM 2 SL Automix Starter kit with GC FujiCEM 2 Dispenser

GC EUROPE N.V.  
Head Office  
Researchpark Haasrode-  
Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
GC EEO - Slovakia  
Raková 1441  
SK - 023 51 Raková / Čadca  
Tel. +421.911.570.999  
Fax. +421.414.000.264  
slovakia@eoo.gceurope.com  
www.eoo.gceurope.com

GC

z OLF SK2 19 06/15



NEW  
SLIDE & LOCK  
system

FujiCEM 2  
od GC

Vynikajúci živinicou modifikovaný skloinomérový fixačný cement s našou inovatívnou technológiou Force & Fusion, pre Vašu pohodlnú prácu.

GC

# Ďalší krok vo vývoji dentálních materiálů.

Neustále zlepšování bolo vždy pre firmy, ako je GC prirodzeným progresívnym procesom.

**GC FujiCEM 2 živickou modifikovaný skloionomérený fixačný cement vo forme pasta - pasta** kombinuje najnovšie skloionomérené technológie, vysokú spoľahlivosť a vylepšenú použiteľnosť pre ešte lepšie výsledky.



GC FujiCEM 2  
Automix



GC FujiCEM  
Automix

GC FujiCEM

## Naše zkušenosti přenesené do vašich fixačních postupů

Profitovaním na spoľahlivosti svojich predchodcov, **GC FujiCEM 2** je výsledkom niekoľkoročných skúseností s **viac ako 150 miliónmi koruniek nacementovaných po celom svete**. Vďaka svojim vynikajúcim fyzikálnym vlastnostiam a pohodlnej manipulácii vám **GC FujiCEM 2** prináša spoľahlivosť a jednoduchosť, ktorú potrebujete pri fixácii vašich náhrad.

# Klůd a pohoda v každé fáze

**Pohodlná manipulácia** je dôležitým faktorom pre to, aby si materiál získal dôveru stomatólogov. Bez ohľadu na to, aký postup si zvolíte, **GC FujiCEM 2** Vám zaručuje ľahký priebeh, a necháva otvorené možnosti:

## Zvoľte si preferovaný dávkovač

Okrem kovového dávkovača Paste Pak Dispenser si môžete vybrať na použitie aj plastový dávkovač, ktorý je o 85% ľahší, autoklávovalateľný a cenovo výhodný.



## Zvoľte si preferovanú ručnú manipuláciu

### Ručné miešanie

Máte možnosť si zvoliť možnosť ručného miešania a jednoducho zmiešať pasty A a B.



### Automix miešanie

Možnosť miešania pomocou koncovky Automix je vynikajúca na dosiahnutie rýchlejšieho a presnejšieho miešania bez rizika vzniku bublín a dutín.




GC FujiCEM 2 je teraz k dispozícii s novým **SYSTÉMOM SLIDE & LOCK**, s vylepšeným dizajnom kartuše pre ľahšie nasádzanie a snímanie zmiešavacích koncoviek.




## Zvoľte si preferované zmiešavacie koncovky

Popri klasickej zmiešavacej koncovke je v ponuke GC FujiCEM 2 zmiešavacia koncovka SL pre Endo s tenkou a zakrivenou predĺženou koncovkou pre ľahšiu aplikáciu do koreňového kanálika pri cementovaní čapov.

GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL

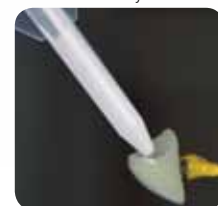

GC FujiCEM 2 zmiešavacie koncovky SL pre Endo

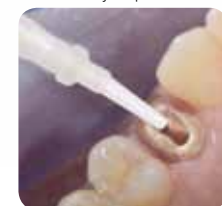

Dr. L. Dahan, Francúzsko

# Čo môžete očakávať od GC FujiCEM 2

S týmto kompletným fixačným systémom, založením na živickou modifikovanej skloionomérennej technológii, volíte bezpečné riešenie pre vašich pacientov. Materiál sa vyznačuje nasledovnými 5 charakteristikami:

- 

### Široké spektrum indikácií

  - Kovové inleje, onleje, korunky a mostíky
  - Živicové inleje, onleje, korunky a mostíky
  - Celokeramické inleje
  - Celokeramické inleje, onleje, korunky a mostíky z vysoko pevnej keramiky (napr. zo zirkónu, lítium dišilikátu atď.)
  - Kovové, keramické a sklené čapy
- 

### Silná retencia

Namiešaný cement disponuje optimálnou chemickou rovnováhou, potrebnou pre adhéziu k zubu, kovu alebo kompozitu. Rýchle tuhnutie, pevnosť v tlaku a ohybe poskytujú najlepšiu podporu pri fixácii nepriamych náhrad.
- 

### Trvalé uvoľňovanie fluoridov

Z dlhodobého hľadiska, pasta uvoľňuje oveľa vyššie množstvá fluoridu, ako iné samoadhezívne živicové cementy.
- 

### Tesniaca schopnosť a marginálna integrita

Chemická väzba k štruktúre zubu zachováva zapečatenie okrajov, minimalizuje riziko micro-leakage a sekundárnych kazov.
- 

### Žiadna pooperačná citlivosť

Materiál nie je dráždivý pre zubné štruktúry, ani okolité mäkké tkanivá, neprináša teda pacientom žiadne riziká pooperačnej citlivosti.