

# FujiCEM Evolve od GC

Krok vpred



Východisková situácia



Dávkovanie s automixom



Nasadenie náhrady



Gumový stav sa dosiahne len po 3 sekundách svietenia (tzv. „tack-curing“)



Lahké odstránenie prebytočného materiálu naraz



Konečný výsledok

S láskavým dovolením Prof. R. Sorrentino, Taliansko



FujiCEM Evolve GC syringe (9.2 g / 5.0 ml)	
012951	GC FujiCEM Evolve Starter Kit: Syringe (1), Tips Regular (15) EEP
012952	GC FujiCEM Evolve Triple pack Handmix: Syringe (3), Mixing Pad (1) EEP
012953	GC FujiCEM Evolve Triple pack Automix: Syringe (3), Tips Regular (45) EEP
012954	GC Push and Click Tip Regular (15)
012955	GC Push and Click Tip Endo (15)



Podrobný postup pre všetky druhy cementovania nájdete v príručke **GC Luting Guide**

FujiCEM je ochranná známka spoločnosti GC.

Ketac CEM Plus Automix, Meron Plus QM a Riva Cem nie sú ochrannými známkami spoločnosti GC.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Slovakia  
Raková 1441  
SK - 023 51 Raková / Čadca  
Tel. +421.911.570.999  
Fax. +421.414.000.264  
info.slovakia@gc.dental  
www.eeo.gceurope.com

**GC**

ZO LFSK 02 110 - 12/19



Krok vpred

FujiCEM™ Evolve  
od GC

Inovatívny živicom modifikovaný  
skloionomérený cement  
pre spoľahlivý výkon  
a príjemné pohodlie

**GC**

# FujiCEM Evolve od GC

## Krok vpred

Skoionoméry sú s overenou kvalitou odkazom spoločnosti GC, ako to preukazujú nezávislé štúdie po celom svete. Urobte krok vpred a vyberte si jednoduchú aplikáciu, nižšiu citlivosť na techniku a vysokú odolnosť voči vlhkosti s technológiou FujiCEM Evolve.



### Ručné miešanie alebo automixové miešanie



- otvory sú ďaleko od seba: pasty sa navzájom nekontaminujú, je možné aj ručné miešanie

- jednoduché nasadenie zmiešavacej koncovky "Push & Click"
- môže sa dávkovať priamo do náhrady alebo do koreňového kanálika (s endo špičkou)



### Živicou modifikovaný skloionomér, ktorému môžete dôverovať

- menej citlivý na techniku ako živicové cementy
- nie je potrebné pred-ošetrenie: jednorazová aplikácia
- dlhý pracovný čas, krátky čas tuhnutia
- odolnosť voči vlhkosti: kofferdam nie je potrebný
- nižšie riziká pooperačnej citlivosti
- vynikajúce utesnenie a okrajová adaptácia



S láskavým dovolením J. Tapia Guadix, Španielsko


### Optimálna viskozita

- kontrolované vytlačanie pre jednoduchý postup
- tenká hrúbka filmu a presná adaptácia
- možnosť vytvrdzovania „tack-cure“ pre jednoduchšie odstránenie prebytkov




S láskavým dovolením J. Tapia Guadix, Španielsko

### Spoľahlivá väzba za každých okolností

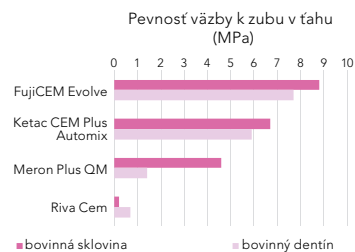

Zdroj: GC R&D Data, Japonsko, 2018. Údaje v súbore.


### Optimalizovaná adhézia k zirkóniu

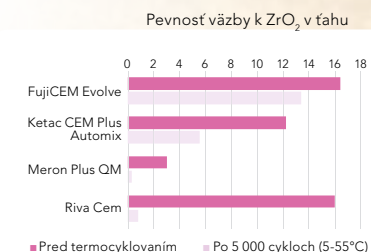

Zdroj: GC R&D Data, Japonsko, 2018. Údaje v súbore.

### Technológia monomérov s dlhým reťazcom

- Monoméry s veľmi dlhým reťazcom pre pevnosť a stabilitu cementu

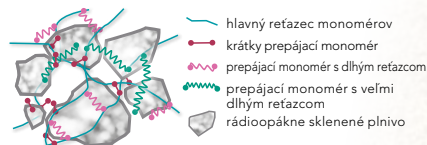

- rádioopákne sklenené plnivo pre vynikajúcu viditeľnosť na RTG (> 250% Al)

### Všestranná voľba pre každodennú prax

FujiCEM Evolve je všestranná voľba pre Vašu každodennú prax, pretože môže byť použitý pre mnohé indikácie a nevyžaduje si absolútnu izoláciu vlhkosti. Okrem toho, vďaka lepšej pevnosti väzby k zirkóniu sa stáva obzvlášť zaujímavým, ak chcete cementovať celokeramické náhrady s vysokou pevnosťou.

Indikované pre:

