

Vector® cleaner

Špeciálny čistič hadicového systému



Vector® cleaner je špeciálny čistič na odstraňovanie nečistôt v hadicovom systéme a v násadci systému Vector® Paro/Vector® od firmy Dürr Dental, ktoré sú rozpustné v kyselinách. Vector® cleaner sa vyznačuje najmä intenzívnym čistiacim účinkom a veľmi dobrou materiálovou znášanlivosťou.

Zloženie: Vector® cleaner obsahuje: anorganické kyseliny (5 -15 %), tenzidy (< 1 %) a pomocné látky vo vodnom roztoku.

Aplikácia: Postup pri čistení systému Vector® Paro/Vector® je opísaný v návode na používanie systému Vector® Paro/Vector®. Čistenie sa vykonáva po 50 prevádzkových hodinách resp. každé 4 týždne. Vector® cleaner sa aplikuje nezriedený. Vodnú nádrž systému Vector® Paro/Vector® naplňte cca 500 ml/50 ml čistiaceho prostriedku Vector® cleaner a čistenie vykonajte podľa návodu na čistenie prístroja Vector® Paro/Vector®. Produkt nechajte pôsobiť 10 minút, maximálne 60 minút. Následne hadicové rozvody a násadec dôkladne opláchnite vodou podľa návodu na používanie prístroja Vector® Paro/Vector®.

Pozor. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Obsah/nádobu zavezte na miesto likvidácie problematického odpadu.