

Vector®/RinsEndo® Dezinfekcia



Prípravok Vector®/RinsEndo® dezinfekcia je bezaldehydový roztok pripravený na priame použitie na dezinfekciu a čistenie vnútorných dielov systému Vector®/RinsEndo® spoločnosti Dürr Dental. Prípravok Vector®/RinsEndo® dezinfekcia je voči materiálom šetrný a ekologicky nezávadný.

Zloženie: 100 g prípravku Vector®/RinsEndo® dezinfekcia obsahuje 32 g 1-propanolu, 26 g etanolu ako aj pomocné látky a vodu.

Spektrum účinkov: baktericídny, tuberkulocídny, fungicídny, obmedzene virucídny (obalené víry, napríklad vacciniavírusy vr. HBV, HCV a HIV¹⁾, ako aj neobalené vírusy, napríklad adenovírusy, polyomavírusy SV 40, norovírusy). Zoznam VAH. Vyskúšaný podľa EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476.

1) Podľa doporučenia RKI (Robert Koch Institut) [Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004].

Použitie: Prípravok Vector®/RinsEndo® dezinfekcia sa používa nezriedený. Vector®/RinsEndo® dezinfekcia dajte do vyprázdnenej vodnej nádrže systému Vector® a aplikujte podľa návodu na používanie systému Vector®. Toto opatrenie sa musí vykonať zakaždým pred prerušením ambulantnej činnosti, ktoré trvá dlhšie ako 24 hodín (počas víkendy, v deň pracovného voľna, počas dovolenky), ako aj pri nasadení nového vaku prípravku Vector® Fluid polish. Doba pôsobenia je 5 minút (pozri tabuľku v DE). U prípravku RinsEndo® 5 ml natiiahnite Vector®/RinsEndo® dezinfekcia do bežnej jednorazovej injekčnej striekačky s konektorom Luer-Lock, jednorazovú striekačku nasadte na nadstavec a prípravok Vector®/RinsEndo® dezinfekcia pretlačte cez nadstavec RinsEndo®, nechajte účinkovať a potom prepláchnite 5 ml vody. Doba pôsobenia je 5 minút (pozri tabuľku v DE). Nadstavec RinsEndo zvonku dezinfikujte vhodným dezinfekčným prostriedkom, ako napr. Vector®/RinsEndo® dezinfekcia alebo dezinfekčnými utierkami FD 350. Existujúce zvyšky krvi a iné nečistoty zotrite vlhkým rúškom. V takomto prípade nadstavec ešte raz zvonku dezinfikujte a nechajte prípravok pôsobiť. Pred nasledujúcim použitím nadstavec RinsEndo sterilizujte. Presne dodržujte návod na používanie zariadenia RinsEndo®. Pre ďalšie pokyny pozri aj informácie o výrobku na internete.

Pokyny: Bod vzplanutia je 25 °C. Buďte opatrní pri materiáloch citlivých na alkohol (napr. akrylové sklo a pod.) Nadstavec RinsEndo® nedezinfikujte v ponornom kúpeli.

Pozor. Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo

Vector[®]/RinsEndo[®] Dezinfekcia

závraty. Uchovávejte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávejte na dobre vetranom mieste. Uchovávejte v chlade. Obsah/nádobu zavezte na miesto likvidácie problematického odpadu.